

INSTRUKCJA UŻYWANIA

Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania.

Sutricon CC Silikonowe plastry na blizny z witaminą E

Plaster wykonany jest z folii poliuretanowej i warstwy żelu silikonowego zawierającego witaminę E, składniki te zostały dobrane w celu zapewnienia biokompatybilności. Wielkość plastra dostosowana do blizn po cesarskim cięciu.

WSKAZANIA:

Wyjątkowe właściwości żelu silikonowego poprawiają wygląd blizn starych i świeżych. Silikonowe plastry stosowane są:

- w leczeniu blizn przerostowych (hipertroficzných), blizn keloidowych (bliznowców) starych i świeżych,
- w zapobieganiu nieprawidłowemu bliznowaceniu ran zamkniętych.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

Nie zaobserwowano działań niepożądanych.

SPOSÓB UŻYCIA:

- Przed użyciem dokładnie oczyścić i osuszyć bliznę.
- Wyjąć plaster z opakowania. Możliwe jest pocięcie plastra w celu dopasowania jego wielkości do powierzchni blizny. Należy upewnić się, że plaster całkowicie zakrywa bliznę, jak również powierzchnię wokół blizny (przynajmniej 0,5 cm z każdej strony blizny).

- Rozpocząć usuwanie folii ochronnej z plastra, przykładając samoprzylepną stronę do brzoju blizny.
- Zdjąć ostrożnie ochronną folię, dokleając cały plaster na bliznę.
- Zaleca się raz dziennie zdjąć plaster, bliznę oczyścić neutralnym mydłem i osuszyć.
- Najlepszy efekt uzyskuje się przy ciągłym noszeniu plastra przez 24 godziny.
- Plaster należy zmieniać co 3 - 5 dni, kiedy już nie przywiera do skóry.
- Nie należy używać tego samego plastra przez więcej niż 7 dni.

Wyrób jednorazowego użytku. 

PRZECIWWSKAZANIA:

Plastry Sutricon CC nie mogą być stosowane na:

- rany otwarte,
- rany sączące,
- oparzenia,
- błony śluzowe.

W przypadku reakcji skórnej należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.

Wytwórca:

M-Technologies, 41 rue des Métissages,
59335 Tourcoing, Francja

Dystrybutor:

Verco S.A., Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 5 lok. 6U
01-015 Warszawa

Więcej informacji na www.sutricon.pl

