



## Instrukcja używania



### Silikonowy żel na blizny

#### Spis treści

1. Co to jest **Sutricon Silikonowy żel na blizny** i w jakim celu się go stosuje?
2. Skład.
3. Informacje ważne przed użyciem **Sutricon Silikonowy żel na blizny**.
4. Jak stosować **Sutricon Silikonowy żel na blizny**?
5. Możliwe działania niepożądane.
6. Jak przechowywać **Sutricon Silikonowy żel na blizny**?
7. Inne informacje.

#### Co to jest Sutricon Silikonowy żel na blizny i w jakim celu się go stosuje?

**Sutricon Silikonowy żel na blizny** jest stosowany miejscowo we wspomaganiu leczenia blizn przerostowych i bliznowców (keloidów), w zapobieganiu nieprawidłowemu bliznowaceniu ran zamkniętych oraz w celu łagodzenia objawów związanych z bliznami.

Jego działanie jest oparte na wyjątkowych właściwościach żelu silikonowego, który szybko wysycha, tworząc na powierzchni skóry elastyczną, niewidoczną powłokę utrzymującą odpowiedni stopień nawilżenia skóry i chroniącą bliznę przed czynnikami zewnętrznymi.

Poprawia wygląd blizny, zmniejsza ją i rozjaśnia. Łagodzi świąd, znosi uczucie napięcia i poprawia jakość życia pacjenta. Pozostawia na skórze efekt matowego wykończenia. Regularne stosowanie żelu poprawia wygląd zarówno blizn świeżych, jak i starych.

Zalecany jest wspomagająco w leczeniu blizn po zabiegach chirurgicznych, oparzeniach, blizn potrądzikowych oraz rozstępów.

#### Skład

polisiloksany, dwutlenek krzemu

#### Informacje ważne przed użyciem Sutricon Silikonowy żel na blizny

##### Przeciwwskazania i środki ostrożności

- Żel przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego, miejscowo na skórę.
- Nie stosuj na otwarte, niezagojone rany, uszkodzoną skórę i błony śluzowe.
- Stosuj wyłącznie na czystą i suchą skórę. Nie stosuj na blizny, na które zaaplikowano wcześniej leki lub inne preparaty.
- Nie stosuj w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników żelu. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, przerwij stosowanie wyrobu i skontaktuj się z lekarzem.
- Nie stosuj jeśli na skórze w okolicach blizny występują odczyny alergiczne lub inne zmiany chorobowe.
- Nie używaj, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- Nie stosuj po upływie terminu ważności wydrukowanym na opakowaniu.
- Unikaj kontaktu z oczami.

#### Stosowanie wyrobu z jedzeniem i piciem

Jedzenie i picie nie ma wpływu na skuteczność działania wyrobu.

#### Ciąża i karmienie piersią

W czasie ciąży i karmienia piersią wyrób stosuj po konsultacji z lekarzem.

#### Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Przyjmowanie wyrobu nie wpływa na sprawność psychomotoryczną.





## Silikonowy żel na blizny

### Stosowanie z innymi lekami/ wyrobami medycznymi

Nie stwierdzono interakcji z innymi lekami/ wyrobami medycznymi, jednak przed aplikacją wyrobu nie stosuj żadnych innych leków/ wyrobów medycznych/ płynów na bliznę. Stosuj tylko na czystą i suchą skórę.

### Jak stosować Sutricon® Silikonowy żel na blizny?

Stosowanie żelu powinno rozpocząć się po całkowitym zagojeniu rany i po zdjęciu szwów. Na dokładnie umytą i osuszoną powierzchnię blizny naanieś niewielką ilość preparatu i masuj ją kolistymi ruchami przez około 2-3 min. Rozcieraj bliznę, lekko uciskając ją opuszkami palców.

Zaleca się stosowanie żelu minimum dwa razy dziennie.

### Możliwe działania niepożądane

#### Sutricon Silikonowy żel na blizny jest

dobrze tolerowany i brak jest danych o działaniach niepożądanych po jego zastosowaniu.

W przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznych lub innych objawów niepożądanych, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę. Wyrobu nie należy stosować jeśli na skórę w okolicach blizny występują odczyny alergiczne.

Żel należy stosować wyłącznie zgodnie z instrukcją używania.

### Jak przechowywać Sutricon Silikonowy żel na blizny?

#### Sutricon Silikonowy żel na blizny przechowuj:

- w suchym miejscu, w temperaturze do 25°C;
- nie zamrażać i nie przechowywać w lodówce;
- z dala od promieni słonecznych;
- w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Po zużyciu, opakowanie zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

### Inne informacje:

**Sutricon Silikonowy żel na blizny** jest wyrobem medycznym klasy I.

### Opakowanie

Tubka o objętości 15 ml w kartoniku jednostkowym.



Verco S.A.

Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 5 lok. 6U  
01-015 Warszawa

### Objaśnienia użytych symboli

	zajrzyj do instrukcji używania
	wytwórca
	ostrzeżenie
	znak zgodności CE
	nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone
	chronić przed słońcem
	ograniczenie dopuszczalnej temperatury przechowywania
	użyć przed końcem
	numer serii

Data aktualizacji instrukcji używania: 12.2018

SUTZ15/I/011218